



Sicherheits-Bodendeckenstange

Drive Art. Nr. 10410-10

Typ: 10.173.00.1000 – 15.173.00.9016

max. Belastung: 100 kg

Bedienungsanleitung:

Die Edelstahl-Sicherheits-Bodendeckenstange, gefertigt aus Werkst. 1.4301, eignet sich als Einstiegshilfe und Haltestange für den Bad- und Waschtischbereich. Die Bodendeckenstange ist mit 2 Befestigungsflanschen ausgestattet und kann durch eine Schiebehülse um 200 mm in der Länge verstellt werden. Der Einsatz ist von den räumlichen Gegebenheiten abhängig.

Der Edelstahl ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu desinfizieren, damit die Langlebigkeit erhalten bleibt. Zur Reinigung und Desinfektion sind nur phosphatfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel ohne scheuernde Wirkung zu verwenden.

Beim Befestigen der Boden- Deckenstange sind die Sicherheits- und Montagehinweise zu beachten.

Techn. Daten:

Rohrdurchmesser	32 mm
Wandstärke-Rohr	1,50 mm
Durchmesser-Flansch	78 mm
Stärke-Flansch	3 mm
Max. Belastung	100 kg
Gewicht	3,0 kg
Abmessung	2.350-2.550 mm

Sicherheits- und Montagehinweise

Beim Anbringen des Produktes ist die Anbauhöhe gemäß DIN 18040 zu beachten. Aufgrund unterschiedlicher Wand-, Boden- und Deckenverhältnisse sind individuell zugelassene Befestigungsmittel je nach Wandaufbau zu wählen.

Die mitgelieferte Standardbefestigung enthält Kunststoffdübel sowie Edelstahlschrauben $\varnothing 6 \times 60$. Da diese nur zur Befestigung an den Wandtypen Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandstein (Ks 12) geeignet sind, muss die Wandbeschaffenheit von einem Fachmann auf Eignung zum Anbringen des Artikels überprüft werden. Bei anderen Wandtypen muss eine Fachfirma der Befestigungstechnik hinzugezogen werden. Sollten Sie keine Fachfirma in Ihrer Nähe haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Die Montage hat aus Sicherheitsgründen durch einen Fachmann der Installationstechnik zu erfolgen. Für die Montage wird keine Gewährleistung von uns übernommen. Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die TÜV-geprüfte max. Belastung nicht überschritten werden.

Die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheits- und Montagehinweise sind unbedingt zu beachten.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten. Stand: 08/2014