

Schwenksitz für Kindergehilfe „NIMBO“, Größe „M“

Montageanleitung

Anbau

1. Entfernen Sie die Bolzen (A) am hinteren Rahmen.
2. Entfernen Sie alle Befestigungsteile (C) an den Gleitschienen.
3. Schieben Sie die Montageröhre (B) in die unteren Öffnungen (D) am hinteren Rahmen ein bis diese einrasten.
4. Montieren Sie nun die Befestigungen (C) in den Löchern wo die Bolzen (A) entfernt wurden. Nach dem Zusammenbau sollten die Komponenten in der wie in Bild 3 dargestellten Reihenfolge montiert sein
5. Ziehen Sie die Schrauben nur soweit an, dass die Gleitschienen noch leicht beweglich sind.



Bild 1

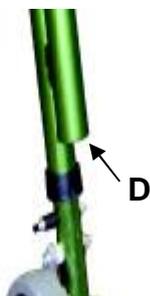


Bild 2



Bild 3



Bild 4

Anwendung

Zum Stehen oder Laufen klappen Sie den Sitz nach oben, ebenso zum Falten. Klappen Sie den Sitz nach unten zum Ausruhen und Sitzen.