


GEBRAUCHSANWEISUNG



Die vorliegende Gebrauchsanweisung ist dem Anwender unbedingt vorzulegen!

Artikel- Nr.: 10430-10
Typ: Seitenwandgriff 90 Grad
459 x 610 mm links
max. Belastung: 120 kg

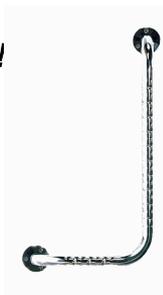

Bedienungsanleitung:

Dieser Edelstahl-Seitenwandgriff, gefertigt aus Werkst. 1.4301, eignet sich besonders als Halteelement für den WC- Bereich, er ist jedoch auch in anderen Bereichen wie Dusche oder Waschplatz einsetzbar. Er ist mit zwei Befestigungsflanschen ausgestattet. **In diesen Stützgriff dürfen keine Duschklassensitze oder andere Gegenstände eingehängt werden.** Der Einsatz ist von den räumlichen Gegebenheiten abhängig.

Der Edelstahl ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu desinfizieren, damit die Langlebigkeit erhalten bleibt. Zur Reinigung und Desinfektion sind nur phosphatfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel ohne scheuernde Wirkung zu verwenden.

Techn. Daten:

Rohrdurchmesser:	32,00 mm
Wandstärke- Rohr	1,50 mm
Durchmesser- Flansch	78,00 mm
Stärke- Flansch	3,00 mm
Max. Belastung	120,00 kg
Gewicht ohne Befestigungsmittel	1,40 kg
Abmessung	459 x 610 mm


Sicherheits- und Montagehinweise

Beim Anbringen des Produktes ist die Anbauhöhe gemäß DIN 18024/ 25 zu beachten. Aufgrund unterschiedlicher Wand-, Boden- und Deckenverhältnisse sind individuell zugelassene Befestigungsmittel je nach Wandaufbau zu wählen.

Die mitgelieferte Standardbefestigung enthält Kunststoffdübel sowie Edelstahlschrauben $\varnothing 6 \times 60$ nach DIN 7995. Da diese nur zur Befestigung an den Wandtypen Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandstein (Ks 12) geeignet sind, muss die Wandbeschaffenheit von einem Fachmann auf Eignung zum Anbringen des Artikels überprüft werden. Bei anderen Wandtypen muss eine Fachfirma der Befestigungstechnik hinzugezogen werden. Sollten Sie keine Fachfirma in Ihrer Nähe haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Die Montage hat aus Sicherheitsgründen durch einen Fachmann der Installationstechnik zu erfolgen. Für die Montage wird keine Gewährleistung von uns übernommen. Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden.

Die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheits- und Montagehinweise sind unbedingt zu beachten!

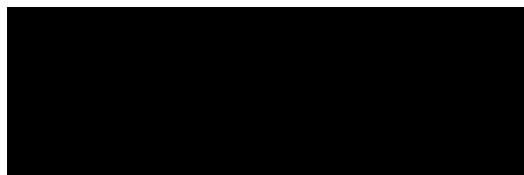

VERTRIEB:
Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
D-88316 Isny im Allgäu
www.drivemedical.de