

# GiGO

## LEICHTGEWICHTROLLATOR


# Nachrüst-Set: Ankipphilfe

## MONTAGEANLEITUNG


### Montage

Benötigtes Werkzeug:  
Für die Montage siehe Bilder

2 Schraubenschlüssel SW 13  
Inbus-Schlüssel 6 mm

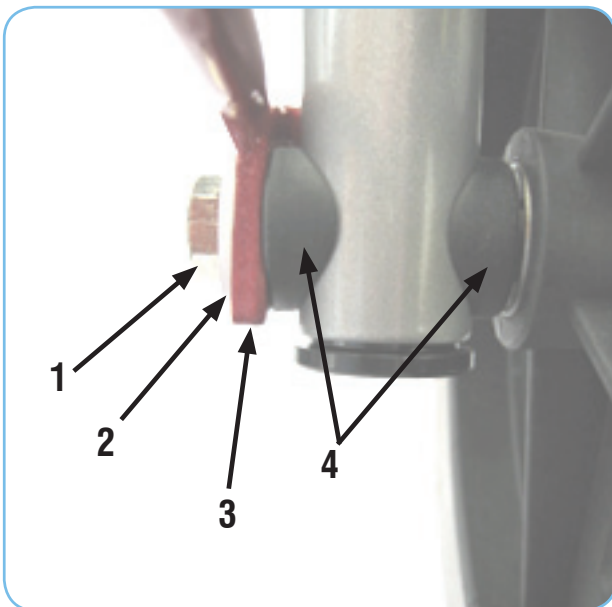

1. Radachsenschraube
2. Kunststoff U-scheibe
3. Ankipphilfe
4. Distanzring

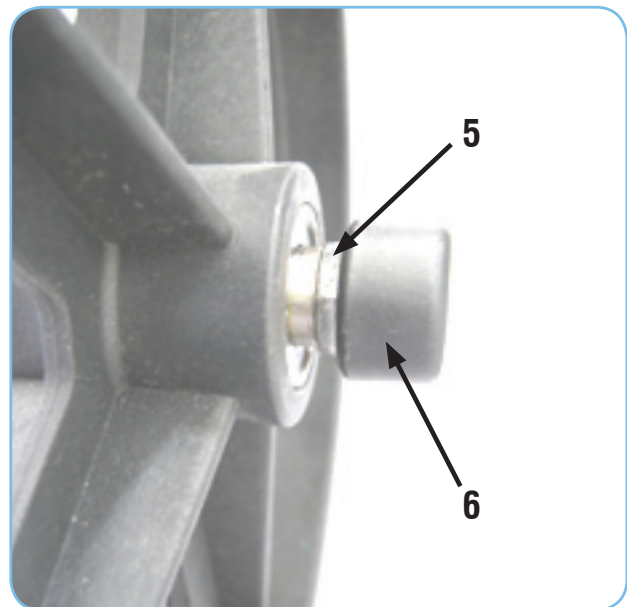

5. Radmutter
6. Abdeckkappe

im Lieferumfang enthalten!

**Montage nur am rechten Hinterrad möglich!**

**Achtung, Schrauben fest anziehen!**

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten  
Stand:06/2013

# GiGO

## LIGHTWEIGHT-ROLLATOR


# Curb climber: Tilting aid

## ASSEMBLING INSTRUCTION


### Assembling

Necessary tools:  
For assembling see picture

2 Screw wrench Size 13  
Allen key 6 mm

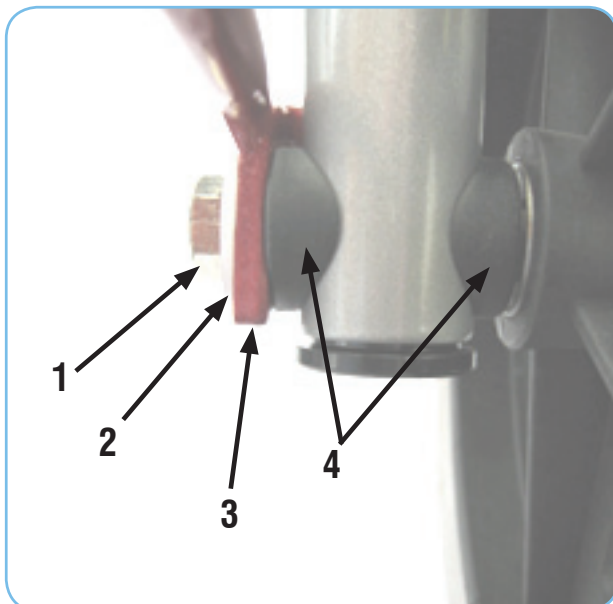

1. Screw bolt
2. Plastic washer
3. Tilting aid/Curb climber
4. Space ring

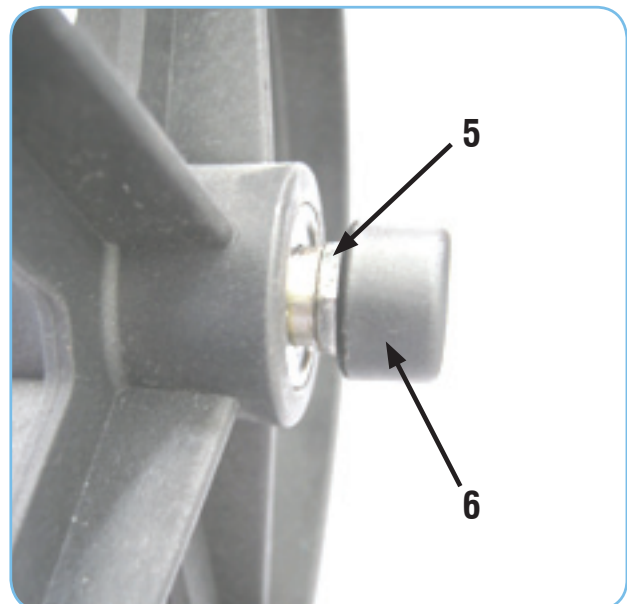

5. Self-locking screw
6. Cover cap

Scope of delivery!

**Tilting aid/Curb climber can only be assembled at the right rear wheel!**

**Attention, tighten screws carefully!**

Subject to technical alterations  
As of: 06/2013